



BACTICID WIPES

DESINFITSEERIVAD RÄTIKUD

Desinfektandiga immutatud rätikud alkoholi taluvate meditsiiniseadmete pindade kiirdesinfektsiooniks..

Toode on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid (sh *Mycobacterium terrae*), desaktiveerib nii ümbrisega (sh HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex) kui ka ümbriseta viirusi (sh Adeno, Rota) ja seeni. Tootes sisalduv desinfektant hävitab pinnal olnud bakterid ning loob bakterite kasvuks ebasoodsa keskkonna. Toode on materjalisõbralik.

KASUTAMINE:

Avada kaane otsas olev klapp ja tõmmata sealt välja rätik kuni perforeeritud kohani. Rätiku lahtirebimiseks võib kaant teise käega toetada. Peale rätiku lahtitõmbamist sulgeda koheselt klapp, vältimaks rätikute kuivamist. Saadaval ka täitepakendid.

Desinfitseeritavad pinnad pühkida rätikuga nii, et kogu pind oleks ühtlaselt desinfektandiga kaetud. Toimeaeg 30 sekundit.

Mikrobioloogia:

Mikroorganism

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus hirae

Mycobacterium tuberculosis

Candida albicans

HBV/HBsAg

HIV

Adenoviirused

Herpes simplex

Rota

Vaccina

BVDV

(surrogaarviirus HCV määramiseks)

Toimeaeg

30 sek.

30 sek.

30 sek

30 sek

30 sek

30 sek

30 sek

30 sek

30 sek

30 sek.

30 sek

30 sek

30 sek

Rätikute desinfitseerimislahus vastab EN 1040, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 13624, EN13697 nõuetele.

Kuna **BACTICID WIPES** desinfitseerimislahus on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat) ja vaccinia viirustele, inaktiveerib toode kõiki kapseldunud viiruseid. Nende katsetuste põhjal võib väita, et **BACTICID WIPES** desinfitseerimislahus on efektiivne ka nn. verega edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, HCV ja HIV, samuti viirusgruppidele nagu orthomyxoviirused (kaasaarvatud influensaviirus, H5N1) ja herpesviirused (Herpes simplex virus).

KOOSTIS:

etanool 72% (toimeaine) kvaternaarsed ammooniumiühendite segu 0,025% (toimeaine), tselluloosist rätikud

ETTEVAATUSABINÕUD:

Toode on väga tuleohtlik.Hoida eemal süttimisallikatest-Mitte suitsetada!
Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole

Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile