

INCIDIN® ACTIVE

AKTIIVHAPNIKU BAASIL SPORITSIIDSE TOIMEGA PUHASTUS- JA DESINFEKTSIOONIVAHEND KÕIKIDELE PESTAVATELE PINDADELE.

INCIDIN® ACTIVE tootes on kombineeritud väga kõrge puhastus efektiivsus ning väga lai mikrobioloogiline toimespekter.

INCIDIN® ACTIVE on testitud rahvusvaheliste standardite järgi. Bakterite, seente, viiruste ja spooride vastase toimega. Incidin Active omab toimet kõikidele viirustele ning ka bakteriaalsetele spooridele. Lühike toimeaeg ning väga hea materjalisobivus. Töölahuse pH tase neutraalne.



INCIDIN® ACTIVE on kontsentreeritud, pulbril põhinev peräädikhapet tootev vahend. Peräädikhape tekib pulbri lahustamisel vees.

Kasutusala: operatsioonitoad, intensiivhooldus ning kõik teised riskipiirkonnad. Kasutatakse paljude erinevate meditsiiniseadmete, meditsiini inventari pindade, põrandate ja seinte puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Kasutamine:

2% lahuse saamiseks lahustatakse 20 g pulbrit (üks doseerimislusikas) 1 L vees. Aeg-ajalt segades lase lahusel 15 minutit seista, et tekiks toimeaine. 15 minuti möödudes on lahus kasutusvalmis. Niisuta pinnad täielikult saadud lahusega.

Valmis töölahuse kasutusaeg on 1 ööpäev.

Koostis: 20g/L (2%): > 1000 mg/L (ppm) peräädikhapet. Toimeaine peräädikhape tekib töölahuse valmistamise käigus.

Mikrobioloogiliste ja viroloogiliste testide tulemused

Toimespekter	Töölahuse %	g/L	Toimeaeg
EN 13727 Bakterite vastane toime	1,0	10	5 min
EN 13624 Pärmseente vastane toime	1,0	10	5 min
Pinadade desinfektsioon mehaanilisel teel vastavalt DGMH (2001) meetodile (bakteritsiidne, tuberkulotsiidne, pärmseente vastane toime)	1,0	10	60 min
EN 14348 Tuberkulotsiidne toime	1,0	10	5 min
EN 13704 Sporitsiidne toime	2,0	20	15 min
EN 14476 Virutsiidne toime	2,0	20	10 min

INCIDIN® ACTIVE pakend:

1,5 kg ämber