

## INCIDIN® PLUS

### GLÜKOPROTAMIINIL BASEERUV PUHASTUS JA DESINFEKTSIOONIVAHEND SUURTELE PINDADELE.

**INCIDIN® PLUS** on vedel kontsentraat kõrgendatud hügieeninõuetega ruumides kõikide vett taluvate pindade pesuks ja desinfektsiooniks.

**INCIDIN® PLUS** on mõeldud kõikidele veepesu kannatavatele pindadele. Kasutatakse ruumide ( seinad, põrandad, aknalauad jne.) pesemiseks ja desinfektsiooniks op.osakondades, protseduuritubades, palatites jne., meditsiiniinventari, voodite, laudade jms. töötlemiseks. Toode on väga hea materjalisobivusega ning ei jäta pindasid kleepuvaks.



**INCIDIN® PLUS** suurepäraseid puhastusomadused on seotud laia toimespektriga, sealhulgas MRSA ja TB.

**INCIDIN® PLUS** sisaldab looduslikku antimikroobset ainet Glükoprotamiin, mis on biolagunev ning ei kahjusta loodust.

**Koostis:** 100 g toodet sisaldab toimeainena 26 g glükoprotamiini

#### Kasutamine:

- Kontsentraat lahjendada toatemperatuuril (16 - 20° C, max 30° C) veega vastavalt vajadusele
- Veelgi hõlpsamaks ja säästlikumaks muudab **INCIDIN® PLUS** kasutamise lahusevalmistaja – dosaator **DG1**. Lahusevalmistaja – dosaator ühendatakse veevärgi ning vooluvõrguga ning ta ise valmistab lahuse vastavalt dosaatorisse programmeeritud kontsentratsioonile.
- Pindade eel-ega järelpesu pole vajalik
- Incidin Plus sobib hästi erinevate materjalidega ning ei ole kleepuv

#### Mikrobioloogilised ja viroliigilised testi tulemused:

	Kontsentratsiooni %	ml / L	Toimeaeg
Bakteritsiidne (sh. EN13727) ja fungitsiidne (sh. EN13624) <sup>1</sup>	0,25	2,5	4 tundi
	0,5	5	1 tund
	1,0	10	30 min
	2,0	20	15 min
Tuberkulotsiidne ja mükobakteritsiidne (sh. EN14348) <sup>1</sup>	1,5	15	1 tund
	3,0	30	30 min
Efektiivsus kaetud viirustele <sup>2</sup> (sh. HIV, HBV ja HCV)	0,25	2,5	1 tund
	0,5	5	15 min
Adeno viirusele	1,0	10	1 tund
Papova viirusele	0,5	5	1 tund
Rota viirusele	0,5	5	15 min

<sup>1</sup> mehaaniline tegevus, puhtad & mustad tingimused vastavalt DGHM meetodile 2001

<sup>2</sup> vastavalt RKI soovitudele 01/2004

#### **INCIDIN® PLUS pakend:**

6 l kanister