

SEKUSEPT® PLUS

ALDEHÜÜDIVABA, GLÜKOPROTAMIINIL BASEERUV PUHASTUS- JA DESINFEKTSIOONIVAHEND INSTRUMENTIDELE.

SEKUSEPT® PLUS on uue põlvkonna glükoprotamiinil baseeruv vedel kontsentraat meditsiiniliste instrumentide manuaalseks pesuks ja desinfektsiooniks.

SEKUSEPT® PLUS on sertifitseeritud DGHM (Saksamaa Hügieeni- ja Mikrobioloogia Ühing) poolt.

SEKUSEPT® PLUS on heaks kiidetud endoskoopide tootja Olympus poolt. Tootele on lisatud korrosiooni inhibiitoreid.

SEKUSEPT® PLUS 'i lahus on stabiilne kuni 48° C

Kasutusala:

Meditsiiniliste instrumentide pesuks ja desinfektsiooniks.

SEKUSEPT® PLUS sobib kasutamiseks ka ultrahelivannis.

SEKUSEPT® PLUS ei sobi kasutamiseks silikoonist valmistatud toodetel.

Koostis: 100 g sisaldab toimeainena 25 g glükoprotamiini



Kasutamine:

- Instrumentid asetada koheselt peale kasutamist **SEKUSEPT® PLUS** lahusesse.
- Jälgida, et instrumentid oleksid lahusega täielikult kaetud.
- Peale ettenähtud toimeaega instrumentid lahusest välja võtta ja veega (vähemalt joogivee kvaliteediga, eelistatud destilleeritud või täiesti soolavaba vesi) puhtaks loputada ning seejärel saata steriliseerimisele.

Ei sobi kasutamiseks koos aldehydide sisaldavate toodetega.

Koormamata töölahus säilib kaetud instrumendivannis 14 päeva.

Koormatud töölahus: säilib 1 ööpäeva ning iga päev tuleb valmistada uus töölahus

Mikrobioloogiliste ja viroloogiliste uuringute tulemused:

	Kontsentratsiooni %	Toimeaeg
Instrumentide desinfektsioon vastavalt VAH meetoditele, sh. M. Terrae	1,5	60 min
	2,5	30 min
	4,0	15 min
Efektiivsus HIV vastu	1,0	5 min
Efektiivsus Hepatiit B vastu	1,5	60 min
	2,0	30 min
	3,0	15 min
Instrumentide desinfektsioon ultraheli vannis	4,0	5 min
Adeno, Papova, Vaccinia	1,5	60 min

SEKUSEPT® PLUS pakendid:

2 l pudel

6 l kanister