

Softa® Cloth CHX 2 %

Niisutatud salvrätid meditsiiniseadmete pinnadesinfektsiooniks ja dekontaminatsiooniks

- 2% CHX (kloorheksidiini) alkohollahusega immutatud ühekordselt kasutatavad salvrätid
- Kasutusvalmis
- Käepärased ja mugavad
- Sobivad kasutamiseks **Discofix® C** ja **Safeflow®** ühenduslülidel

Infusioonravi riskide vältimine

Kätehügieen

Millal on kätehügieen vajalik?

1. Enne patsiendi puudutamist
2. Enne puhast (aseptilist) protseduuri
3. Pärast kokkupuudet kehavedelikega
4. Pärast patsiendi puudutamist
5. Pärast patsiendiga seotud esemete puudutamist

Infusiooniprotsessis kasutatavate ühenduslülide desinfitseerimine Softa® Cloth CHX 2 % abil

Nõelavabad ühenduslülid kateetritel (kanüülidel)

Kontaminatsiooniriski vähendamiseks töödelge kateetri (kanüüli) süsteava Softa® Cloth CHX 2 % abil (vastavalt Haiguste Tõrje ja Profülaktika Keskuse (CDC) suunistele intravaskulaarsete kanüülide/kateetritega seotud infektsioonide ennetamiseks, 2011).

Infusiooniprotsessis kasutatavate ühenduslülide desinfitseerimiseks

„CVAD (*central venous access device*/tsentraalveenikateeter)^{33*} Kateetri ühenduslülide või süsteavade dekontamineerimiseks tuleb neid enne ning pärast iga kasutamist patsiendil desinfitseerida kloorheksidiinglükonaadi alkohollahusega (soovitatavalt 2% kloorheksidiinglükonaat 70% isopropüülalkoholis) eeldusel, et mainitud aine kasutamine pole kateetri tootja poolt vastunäidustatud, lastes lahusel seejärel kuivada. Vastasel juhul tuleb kasutada kas kloorheksidiini vesilahust või polüvidoonjodiidi vesilahust klass D / hea farmaatsiatava (GPP) kohaselt.“

*Pratt, R. J.; Pellowe, C. M.; Wilson, J. A.; Loveday, H. P.; Harper, P. J.; Jones, S. R. L. J.; McDougall, C. & Wilcox, M. H. epic2: National evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect, Richard Wells Research Centre, Faculty of Health and Human Sciences, Thames Valley University, London. robert.pratt@tvu.ac.uk, 2007, 65 Suppl 1, S1-64

Softa® Cloth CHX 2 %

Materjalide kokkusobivus

Sobib Discofix®C ja Safeflow® klapi desinfitseerimiseks.

Kasutusmeetodid / Kasutusjuhend

Puhastage ja desinfitseerige meditsiiniseadmete pinnad salvrätiga. Nähtavalt puhtad pinnad desinfitseeritakse ühes etapis. Kui esineb nähtav kontaminatsioon, viiakse protseduur läbi kahes etapis:

- Nähtav mustus eemaldatakse Softa® Cloth CHX 2 % salvräti abil.
- Desinfitseerimiseks kasutatakse teist Softa® Cloth CHX 2 % salvrätti.

Nähtavalt puhtad pinnad desinfitseeritakse ühes etapis.

Koostis:

70% isopropüülalkohol, 2% kloorheksidiinglükonaat.

Salvräti materjal 25 g/m² 100% PP (polüpropüleen) (hüdrofiilne, mitteiooniline viimistlus)

Ühe salvrätipakendi kaal 3,4 g

Salvräti mõõtmed lahti voldituna 162 mm x 150 mm

kokku voldituna 42 mm x 32 mm

Välimus

puhtad valged ühetaolised salvrätid, mis on eelniisutatud vedelikuga, vabad võõrlisanditest

Mikrobioloogiline efektiivsus

Softa® Cloth CHX 2 % on efektiivne: bakterite ja pärmseente suhtes

Kontsentratsioonid ja ekspositsiooniajad

Mikroorganism	Testimise normatiivid	Ekspositsiooniaeg
E.hirae, S. aureus, E.coli, P. aeruginosa	EN 13727	15 sekundit puhastes ja määratud tingimustes
C.albicans	EN 13624	15 sekundit puhastes ja määratud tingimustes

Sertifikaadid

Softa® Cloth CHX 2 % on registreeritud vastavalt meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EEC nõuetele ja omab CE-märgistust.

Müügipakend / Säilivusaeg

Toode	Säilivusaeg	Pakendi suurus	Tootekood (REF)
Softa® Cloth CHX 2 %	24 kuud	100 salvrätti	19582

Tootja

B.Braun Medical AG,
CH-6204 Sempach, Šveits

Maaletooja

B.Braun Medical OÜ
Kadaka tee 70B
12618 Tallinn
Tel: 677 12 00
e-mail: info@bbraun.ee
www.bbraun.ee