



Kateetrist uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Valmista ette uriinikatsuti, adapter või nõel ja nõelahoidja ning vajadusel paber kandjal tellimisleht.
eHL või muu infosüsteemi kasutajad: markeeri uriinikatsuti võotkoodiga ning esita tellimus elektroonselt.

Paber kandjal tellimisleht: markeeri uriinikatsuti patsiendi ees- ja perekonnanime ning isikukoodiga.

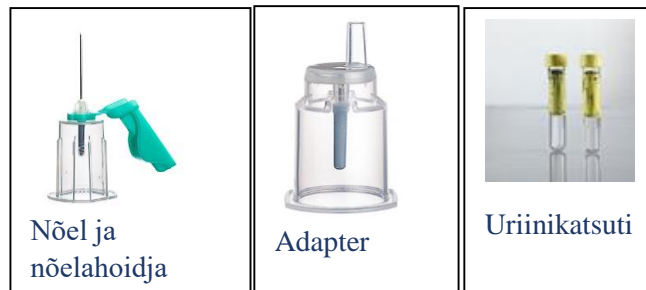

Uriini võtmine kateetrist

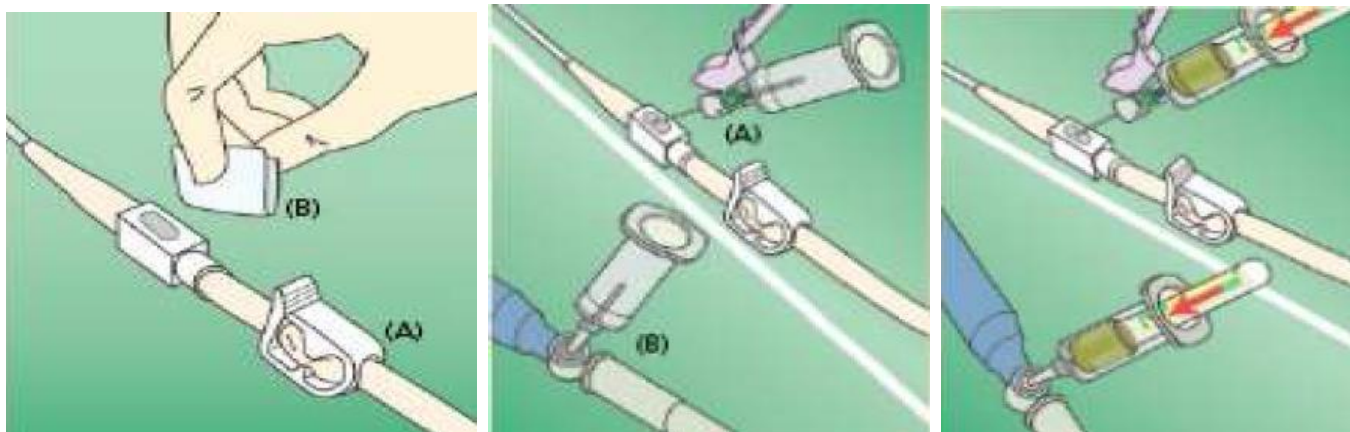

Sulge kateetri voolik (A). Puhasta kateetri proovivõtu koht (B).

Kontrolli, et voolik sisaldaks uriini. Torka proovivõtukoht nõelaga läbi (A) või kasuta adapterit (B).

Suru uriinikatsuti nõelahoidja või adapteri põhja. Hoida uriinikatsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda uriinikatsuti.

Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/võotkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood).

Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte.

Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

Materjal: registreeri õige materjal

Proovinõu tüüp: **uriinikatsuti**

Sisendparameetrid: **vajadusel**

Uriinikatsuti saatmine laborisse

Uriinikatsuti saata laborisse nii kiiresti kui võimalik (mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni). Kui see ei ole võimalik, hoida uriinikatsutit temperatuuril +2...+8 °C ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt kolme tunni jooksul.

