



# Tartu Ülikooli Kliinikum

## ÜHENDLABOR

Kliinilise keemia ja laboratoorse hematoloogia osakond

L. Puusepa 8, 51014 Tartu, tel. 7318316, 7318315

Lastehaigla osakond

Lunini 6, 51014 Tartu, tel. 7319591

<http://www.kliinikum.ee/yhendlabor>



STL1110016

KLEEBI SIIA VÕÖTKOOD

## URIINI UURINGUTE TELLIMISLEHT

Patsiendi PERENIMI ..... EESNIMI .....

Isikukood (või sugu ja vanus) ..... Proovivõtu kuupäev .....

Tellijä (nimi, kood) ..... Proovivõtu kellaeg .....

Tellijä telefon ..... Proovivõtja (nimi, kood) .....

Asutus, osakond .....

<b>Uriinikatsuti (beež kork)</b>	<input type="checkbox"/> Uriin (esmane hommikune)	<input type="checkbox"/> Uriin (kateetri)
	<input type="checkbox"/> Uriin	<input type="checkbox"/> Uriin (nefroostoomi)
<input type="checkbox"/> Uriini ribaanalüüs		
<input type="checkbox"/> Uriini sademe mikroskoopia		
<input type="checkbox"/> Düsmorfsed erütrotsüüdid		
Lastekliiniku patsientidele		
<input type="checkbox"/> Uriini külv (Uricult) <input type="checkbox"/> Uriini külv (Uricult) vajadusel		

Uriini kogumise lühijuhend (vaata pöördelt)

## Uriini kogumise lühijuhend

Uriini kogumiseks on vajalik spetsiaalne uriinitops\*. Ära eemalda kaanelt kaitsekleebist enne uriini kogumist. Keera uriinitopsilt kaas, kogu uriin uriinitopsi ja keera kaas tagasi uriinitopsile. Uriinikatsuti täitmiseks toimi järgmiselt:



Eemalda topsi kaanelt kaitsekleebis, nähtavale ilmub kummiga kaetud nõel.



Suru beeži korgiga uriini vaakumkatsuti (korgiosa ees) uriinitopsi kaanes oleva avause põhja. Hoia katsutit kuni uriinivool katsutisse lakkab. Eemalda katsuti avausest.



Kleebi katsutile eHL juhtumi vöötкод või kirjuta patsiendi nimi. Märki tellimislehele uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

\*Imikutel ja väikelastel kasuta uriini kogumiseks topsi asemel spetsiaalset kogumiskotti. Uriinikatsuti täitmiseks kasuta ühekordset kõrt.

Saada uriinikatsuti laborisse. Uriin ei tohi seista toatemperatuuril üle kahe tunni. Uriinitopsi või kogumiskotti laborisse ei saadeta!