



SA Tartu Ülikooli Kliinikum ühendlabor	Tähis	JÜLKH-10.4
	Viide	PÜL -10
	Versioon	02

Uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga



Vahendid

Valmista ette uriinitops, uriinikatsuti ja tellimisleht.
 Markeeri uriinikatsuti ja uriinitops eHL vöotkoodiga. Täida tellimisleht.
 Mediposti kasutajad: markeeri uriinikatsuti vöotkoodiga.
 Uriinitopsile kirjuta patsiendi nimi. Esita tellimus elektroonselt.



Tartu Ülikooli Kliinikum
 ÜHENDLABOR
 Kliinikumite teenuste ja laboriteenuste osakond
 a. Pärnuaia 11, Tartu, Eesti, 51010
 Laborite osakond
 Laski, 51010, Eesti, 51010
 http://www.tu.ee/keskmeditsiin

KLEEBI SIDA VÖOTKOOD

URIINI URINGUTE TELLMISLEHT

Patsiendi PERENIMI EESNIMI

Isikukood (või sugu ja vanus) Preevhiirite kaugus
 Tellija nimi, aadress Preevhiirite kaugus
 Tellija telefon Preevhiirite (nimi, aadress)

Asutus, osakond

Uriinikatsuti õuei kerk Ühis (erineva hõlmavuse) Ühis (kaaberi)
 Ühis Ühis

Uriini rõõnaku
 Uriini süsteemi ehituskood
 Uriini eelne ettevalmistus
 Isiklikult patsiendile
 Uriini kate (Ühis) Uriini kate (Ühis) eespool

Uriini kogumise vöõtkood (või teine vöõtkood)



Uriini kogumine



Pese hoolikalt käed ja seejärel genitaalpiirkond.
 Pesemisevahendeid ei soovitata kasutada.



Keera lahti uriinitopsi kaas.
 Aseta kaas kõrvale nii, et kaane põhjal olev proovimaterjali memmisotsik jääks suunaga ülespidi.



Tähelepanu!
 Otsikut mitte puutada.



Urineeri esimene uriinikogus WC-potti.
 Kogu uriinitopsi umbes 50 ml keskjoa uriini.



Eemalda uriinitopsi kaitsekleebis.



Suru uriinikatsuti kaanes oleva avause põhja. Hoia katsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb.
 Eemalda katsuti avausest.



Sega uriinikatsutit paar korda ja asetä kaitsekleebis tagasi kaanel olevale avausele.



Saada uriinitops jäätmekäitlusse!

Uriinikatsuti transport

Märgi tellimislehele uriini vötmise kuupäev ja kellaaeg. Saada uriinikatsuti laborisse.
 Uriin ei tohi seista toatemperatuuril üle kahe tunni.

