

**VACUETTE® Blood Collection Set** ohulibliknõel koos nõelahoidjaga on sobilik verevõtuks lastel või täiskasvanutel „problemaatiliste veenide“ korral. Kasutada koos VACUETTE katsutitega. Visuaalseks veenipunktsiooni jälgimiseks on läbipaistev aken, mis tagab veelgi turvalisema verevõtu.



**VACUETTE® Blood Collection Set - ohulibliknõel koos nõelahoidjaga  
KASUTUSJUHEND**

<p>Eemalda nõelakaitse</p>	<p>Punkteeri veen</p>	<p>Lükka katsuti nõelahoidjasse ja suru katsutit nii, et lateksiga kaetud nõel läbistaks kummikorgi</p>
<p>Eemalda katsuti. Keera katsutit pärast adapterist eemaldamist koheselt 4 - 5 korda rahuliku liigutusega ülespidi ja tagasi, et veri seguneks lisandiga.</p>	<p>Aktiveeri nõela turvakaitse, vajutades nagu juuresoleval pildil näha</p>	<p>Tõmba (vt pilt), kuuldav „klikk“ näitab nõela turvakaitse aktiveerumist</p>
		<p><b>greiner bio-one</b></p> <p>Greiner Bio-One Ltd. Brunel Way, Stroudwater Business Park, Stonehouse, Glos. GL10 3SX. Tel: 01453 825255. Fax: 01453 826266. email: info@gbo.com</p>
<p>Turvakaitsega aktiveerunud ohulibliknõel</p>	<p>Viska kasutatud vahend selleks ettenähtud jäätmekonteinerisse</p>	