








# Vaakumkatsutite verevõtu järjekord

Korgi värvus		Katsuti nimetus	Lisand	Kasutusala	Segamine
Hall Roheline Lilla Roosa Valge		Bactec AER Bactec MYC Bactec AN Bactec PED Bactec MYCO/F Lytic		Mikrobioloogilised uuringud	<b>3-4 korda</b>
Helesinine musta rõngaga		9NC-katsuti	Naatriumtsitraat	Hüübimisuuringud	<b>4-5 korda</b>
Must		4NC-katsuti	Naatriumtsitraat	Erütrotsüütide settekiiruse määramine	<b>5-10 korda</b>
Punane kollase rõngaga		Geeli ja hüübimis-aktivaatoriga katsuti	Geel ja hüübimisaktivaator	Kliinilise keemia, immunoloogilised, virooloogilised uuringud	<b>5-10 korda</b>
Roheline kollase rõngaga		Geeliga LH-katsuti	Geel ja liitiumhepariin	Kliinilise keemia uuringud (k.a. ravimid)	<b>5-10 korda</b>
Lilla musta rõngaga		K2E/K3E-katsuti	K2-EDTA	Hematoloogilised ja immuun-hematoloogilised (AB0 ja RH(D)) uuringud	<b>5-10 korda</b>
Hall musta rõngaga		Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti	Naatriumfluoriid/ kaaliumoksaalat	Glükoosi ja laktaasi määramine	<b>5-10 korda</b>