

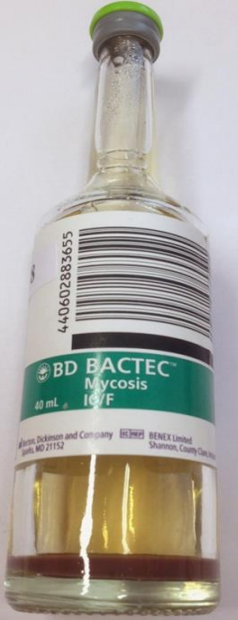




Materjali kogumine Bactec külvideks

Materjal	Proovinõu tüüp				
Abstsessimaterjal Amnionivedelik Liikvor Dialüüsivedelik Dreenieritis Haavaeritis Koevedelik Liigesevedelik Pleuravedelik Perikardivedelik Kõhuõõnevedelik Sapp Veri	Bactec AN pudel 8(3) - 10 ml 	Bactec AER pudel 8(3) - 10 ml 	Bactec MYC pudel 8(3) - 10 ml 	Bactec PED pudel 1 - 3 ml- lastele või vähese materjali hulga korral 	Myco/F-Lytic pudel 1 - 5 ml (veri) 

Materjalivõtt ja säilitamine: vere võtuks kasutada ohulibliknõela. Muud materjalid kanda pudelisse süstla abil. Materjal saata laborisse esimesel võimalusel. Hoida toatemperatuuril (15° - 25°C), väljaarvatud liikvor meningiiditekitaja diagnostikaks mida hoida 37°C juures.