

## Gaas-sterilisatsiooni kontroll

Mikrobioloogia osakond, tel. 731 9338, 731 9339

### Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Proovinõu	Autoklaavi bioloogilise kontrolli tablett testkultuuriga
Säilivus	Toatemperatuuril maksimaalselt kaks tundi

Tablett läbib steriliseerimistsükli koos steriliseeritava materjaliga. Tsükli läbinud tablett saadetakse laborisse uuringuks.

**Analüüsi tegemise aeg:** tööpäeviti

**Analüüsimeetod:** tablett pannakse (mitte hiljem kui 2 tundi peale sterilisatsiooni) aseptilistes tingimustes rikastussöötmesse, inkubeeritakse +56 °C juures viis päeva. Lõplik vastus antakse 5. päeval.

### Näidustus ja kliiniline tähendus

Gaas-sterilisatsiooni tõhususe kontroll.

Kasv puudub = steriilne, steriliseerimine on olnud piisav; esineb kasv = mittesteriilne, steriliseerimine ei olnud piisav.

Krista Lõivukene