

IGFBP-1 tupekaapes (Vag-IGFBP-1)

Laboratoorse hematoloogia ja üldkliiniliste analüüside osakond, tel. 731 8315

IGFBP-1 (*insulin-like growth factor binding protein-1*) kontsentratsioon lootevedelikus on 100–1000 korda kõrgem kui seerumis. IGFBP-1 ei esine tavaliselt tupes. Lootekestade rebendi järel seguneb kõrge IGFBP-1 kontsentratsiooniga lootevedelik tupe eritisega.

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Tupesekreedi proov võetakse steriilse vatitampooniga tupe võlvist või emakakaelalt, vatitampooni hoitakse tupes 10–15 sekundit ja asetatakse seejärel ekstraheerimislahusesse, keerutades tampooni vastu katsuti seinu 10 sekundi jooksul.

Proovis ei tohi olla verd!

Katsuti	Fosfaatpuhverlahusega katsuti
Säilivus	Ekstraheeritud proovimaterjal neli tundi toatemperatuuril

Analüüsi tegemise aeg: ööpäevaringselt

Analüüsimeetod: immuunkromatograafiline meetod

Vastuse vorm

Positiivne/negatiivne

Näidustus ja kliiniline tähendus

Positiivne tulemus viitab lootevedeliku olemasolule tupes.

Anneli Aus