

Oksaalhape ööpäevases uriinis (dU-Oxal) Tsitraat ööpäevases uriinis (dU-Citr)

Vastuvõtu ja logistika osakond, tel. 731 8316, korraldab proovi saatmise, analüüsi teostab synlab, tel. 17123

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Ööpäevase uriini (dU) kogumisel tuleb kasutada konservandina 10–15 mL soolhapet (6 mol/L) (saab kliinilise keemia laborist), mis valatakse kogumisnõusse pärast esimest kogutud uriiniportsjonit.

Enne ööpäevase uriini kogumise alustamist tühjendab patsient põie. Seda uriiniportsjonit ei koguta, kuid kellaaeg registreeritakse uriini kogumise algusena. Seejärel urineerib patsient ööpäeva jooksul kogumisnõusse, viimast korda täpselt 24 tunni möödudes peale kogumise algust. Iga järgneva uriiniportsjoni lisamisel nõusse tuleb uriini segada. Kogumisnõu hoitakse urineerimise vaheaegadel külmkapis. Enne laborisse saadetavate proovide eraldamist segatakse ja mõõdetakse kogu ööpäevane uriin. Tellimusele märgitakse eritunud uriini hulk.

Proovinõu	Uriinikogumisnõu (konservant 10–15 mL 6 mol/L HCl), laborisse kaks 10 mL uriinikatsutit
Säilivus	-20 °C pikemat aega

Transport toimub tööpäeviti synlab Eesti autoga

Referentsväärtused

dU-Oxal	< 44 mg/d
dU-Citr	> 1,7 mmol/d