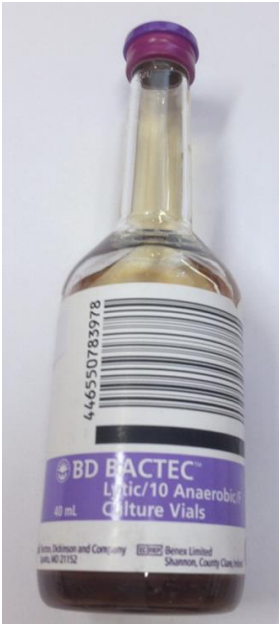


Materjali kogumine Bactec külvideks

Materjal	Proovinõu tüüp			
Abstessimaterjal Amnionivedelik Liikvor Dialüüsivedelik Dreenieritis Haavaeritis Koevedelik Liigesevedelik Pleuravedelik Perikardivedelik Kõhuõõnevedelik Sapp Veri	Bactec AN pudel 8(3)—10 ml 	Bactec AER pudel 8(3)—10 ml 	Bactec MYC pudel 8(3)—10 ml 	Bactec PED pudel 1—3 ml- lastele või vähese materjali hulga korral 

Materjalivõtt ja säilitamine: tötle punktsioonikoht naha antiseptikumiga. Korgikatte eemaldamise järel tuleb iga pudeli kork eraldi desinfitseerida vähemalt 70% alkoholilahusega. Verekülvide võtmiseks kasuta turvalibliknõela. Bactec pudelis on vaakum, seetõttu tuleb vere võtmisel hoolikalt jälgida pudelisse kogutud vere kogust, kasutades selleks pudelil oleval kleebisel paiknevat 5 mL intervalliga märgistust. Pärast nõelahoidjast eemaldamist tuleb pudelit loksutada ringjate liigutustega, et veri seguneks söötmega. Erandjuhul süstlaga punkteerimisel kasutada spetsiaalset turvanõela ja verepudelisse sisestamiseks spetsiaalselt süstla jaoks mõeldud turvasüsteemi. Materjal saata laborisse esimesel võimalusel. Hoida toatemperatuuril (15° - 25°C), väljaarvatud liikvor meningiiditekitaja diagnostikaks, mida hoida 37°C juures.

Uuringumaterjalide võtmine: Bactec külvid; v02; 22.04.2021, koostamise eest vastutaja Pille Mee