

## Esmasjoo uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

### Esmasjoo uriini kogumiseks kasutatavad proovinõud



Uriinitops



Uriinikatsuti

**Ettevalmistus:** valmista ette uriinitops ja uriinikatsuti ning vajadusel paber kandjal tellimisleht.  
**eHL või muu infosüsteemi kasutajad:** markeeri uriinikatsuti võõtkoodiga ja esita tellimus elektroonselt.  
**Paberkandjal tellimisleht:** markeeri uriinikatsuti patsiendi ees- ja perekonnanimega ning isikukoodiga.

### Esmasjoo uriini kogumine




**1.** Pese välissuguelundid voolava veega (pesemisvahendeid ei ole lubatud kasutada). Kuivata välissuguelundid kergelt.



**4.** Kogu uriinitopsi 15—30 ml **esmasjoo** uriini ehk täida  $\frac{1}{4}$  uriinitopsist. Lõpeta urineerimine WC potti. Enne proovi kogumist ei ole soovitatav 2—4 tundi urineerida.



**6.** Suru uriinikatsuti kaanes oleva avause põhja. Hoia katsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti avausest.

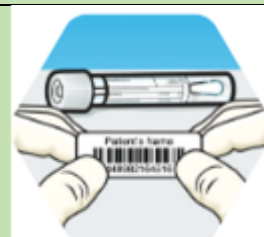

juhtumikood/võõtkood. või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte. Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaeg.

**Materjal:** registreeri õige materjal  
**Proovinõu tüüp:** **uriinikatsuti**  
**Sisendparameetrid:** **vajadusel**



**2.** Keera lahti uriinitopsi kaas. Aseta kaas nii, et kaane põhjal olev imemisotsik jääks suunaga ülespidi.



**5.** Keera uriinitopsile kaas peale. Sega ja seejärel eemalda kaanelt kaitsekleebis.



**7.** Sega uriinikatsutit paar korda ja asetä kaitsekleebis tagasi kaanel olevale avausele.



**9.** Uriinikatsuti saata laborisse nii kiiresti kui võimalik (mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni). Kui see ei ole võimalik, hoida uriinikatsutit temperatuuril +2...+8 °C ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt 48 tunni jooksul.



**3.** Tähelepanu! Imemisotsikut käega mitte puutada.



Ülejäänud uriin vala kanalisatsiooni ja tühi tops viska olmeprügisse.