

## Imikutel ja väikelastel uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Valmista ette uriinikatsuti, adapteriga ühekordne kõrs, uriini kogumiskott ning vajadusel paber kandjal tellimisleht.

eHL või muu infosüsteemi kasutajad: markeeri uriinikatsuti vötkoodiga ning esita tellimus elektroonselt.

Paber kandjal tellimisleht: markeeri uriinikatsuti patsiendi ees- ja perekonnanime ning isikukoodiga.




Adapteriga  
ühekordne kõrs




Uriinikatsuti

### Uriini kogumine imikutel ja väikelastel

Pese lapse genitaalide piirkond hoolikalt veega. Kleebi nahale steriilne kogumiskott ja jälgi aeg-ajalt uriinivoolu. Kogumiskott võib nahal olla maksimaalselt **üks tund**. Kui selle aja jooksul uriiniproovi ei õnnestu koguda, tuleb pesemist ja kogumisprotseduuri uue steriilse kotiga korrata.

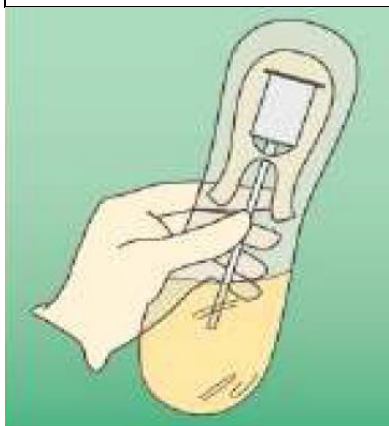

1. Hoida uriini kogumiskotti vertikaalselt, asetada adapteriga ühekordne kõrs uriini sisse.

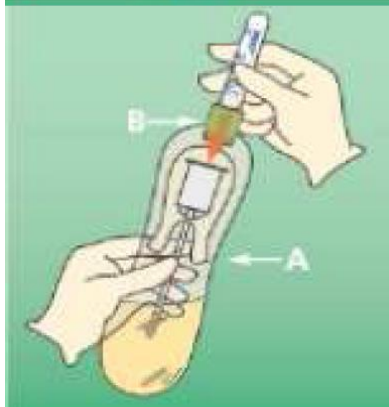

2. Hoida ühe käega kõrt (A), teise käega suru uriinikatsuti adapteri põhja, läbistades nõelaga uriinikatsuti korgi (B). Hoida uriinikatsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti adapterist.

### Uriinikatsuti saatmine laborisse

Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg. Uriinikatsuti saata laborisse nii kiiresti kui võimalik (mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni). Kui see ei ole võimalik, hoida uriinikatsutit temperatuuril +2...+8 °C ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt kolme tunni jooksul.

