

Keskjoauriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Keskjoauriini kogumiseks kasutatavad proovinõud



Uriinitops



Uriinikatsuti

Ettevalmistus: valmista ette uriinitops ja uriinikatsuti ning vajadusel paberkandjal tellimisleht.


eHL või muu infosüsteemi kasutajad: markeeri uriinikatsuti võõtkoodiga ja esita tellimus elektroonselt.

Paberkandjal tellimisleht: markeeri uriinikatsuti patsiendi ees- ja perekonnanimega ning isikukoodiga.

Keskjoauriini kogumine




1. Pese välissuguelundid volava veega (pesemisvahendeid ei ole lubatud kasutada). Kuivata välissuguelundid kergelt.

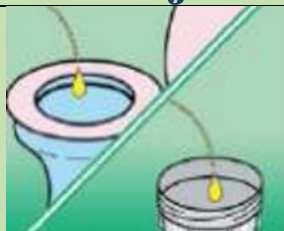

4. Urineeri esimene 10 milliliitrit WC-potti, juba katkestamata kogu uriinitopsi umbes 50 ml uriini.



6. Suru uriinikatsuti kaanes oleva avause põhja. Hoida katsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti avausest. Lõpuks aseta kaitsekleebis tagasi kaanel oleva avause peale.

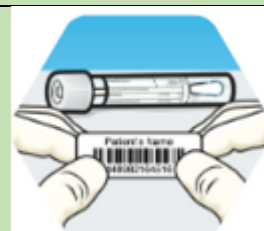

8. Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL

juhtumikood/võõtkood. või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte. Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

Materjal: registreeri õige materjal
Proovinõu tüüp: **uriinikatsuti**
Sisendparameetrid: **vajadusel**



2. Keera lahti uriinitopsi kaas. Aseta kaas nii, et kaane põhjal olev imemisotsik jääks suunaga ülespidi.



5. Keera uriinitopsile kaas peale. Sega ja seejärel eemalda kaanel kaitsekleebis.



7. Sega uriinikatsutit paar korda ja aseta kaitsekleebis tagasi kaanel olevale avausele.



9. Uriinikatsuti saata laborisse nii kiiresti kui võimalik (mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni). Kui see ei ole võimalik, hoida uriinikatsutit temperatuuril +2...+8 °C ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt kolme tunni jooksul.



3. Tähelepanu! Imemisotsikut käega mitte puutuda.



Ülejäänud uriin vala kanalisatsiooni ja tühi tops viska olmeprügisse.