

VACUETTE Holdex (greiner bio-one, ref 450263) *Luer* adapter on nõelahoidjaga steriilne, läbipaistvast polüpropüleenist, ühekordseks kasutamiseks mõeldud lihtne ja turvaline vahend vere võtmiseks kanüülist/kateetrist. Sobib kõigile *Luer* tarvikutele. *Luer* otsik asetseb adapteri ülaosas serval, mis tagab optimaalse nurga verevõtuks. Adapteri sees on roostevabast terasest lateksiga kaetud nõel. Adapter on ettenähtud vere võtmiseks kasutades VACUETTE katsuteid. Võimaldab verevoolu optilist kontrolli ja võtta korraga mitu verekatset.



VACUETTE Holdex *Luer* adapteri KASUTUSJUHEND



1 Sisesta adapter lükkava liigutusega kanüüli/kateetri vastavasse *Luer* avasse. Veenduge kindlas ühenduses, et vältida adapteri lahtitulemist vere võtmise käigus.



2 Lükka katsuti adapterisse ja suru see adapteri põhja, nii et lateksiga kaetud nõel läbistaks kummikorgi.



3 Oota, kuni verevool katsutisse lakkab. Veri voolab katsutisse kuni vaakum katsutist kaob.



4 Keera katsutit pärast adapterist eemaldamist koheselt 4 - 5 korda rahuliku liigutusega ülespidi ja tagasi, et veri seguneks lisandiga.



5 Viska kasutatud adapter selleks ettenähtud jäätmekonteinerisse.



greiner bio-one

Greiner Bio-One Ltd.
Brunel Way,
Stroudwater Business Park,
Stonehouse, Glos. GL10 3SX.
Tel: 01453 825255.
Fax: 01453 826266.
email: info@gbo.com