

VACUETTE® QUICKSHIELD ohunõel koos nõelahoidajaga on sobilik rutiinseks verevõtuks VACUETTE katsutitega. Verevõtu tehnika ei erine tavalisest verevõtu tehnikast. Nõela turvakaitse aktiveeritakse ühe käe abil surudes seda vastu kõva pinda või siis pöidla abil. Toode on kasutajale lihtne käsitleda ja annab turvalisema infektsiooniohu kaitse. Pärast nõela turvakaitse aktiveerumist ei ole toodet enam võimalik kasutada.



VACUETTE® QUICKSHIELD Safety Tube Holder - ohunõel koos nõelahoidjaga KASUTUSJUHE



1 Ava pakend ja võta pakendist ohunõel koos nõelahoidjaga



2 Eemalda nõelakaitse



3 Punkteeri veen



4 Lükka katsuti nõelahoidjasse ja suru katsutit nii, et lateksiga kaetud nõel läbib kummikorgi



5 Eemalda katsuti. Keera katsutit pärast adapterist eemaldamist koheselt 4 - 5 korda rahuliku liigutusega ülespidi ja tagasi, et veri seguneks lisandiga



6 Aktiveeri nõela turvakaitse



7 Kuuldav „klikk“ näitab nõela turvakaitse aktiveerumist



8 Viska kasutatud nõel ja nõelahoidja selleks ettenähtud jäätmekonteinerisse


greiner bio-one

Greiner Bio-One Ltd.
Brunel Way,
Stroudwater Business Park,
Stonehouse, Glos. GL10 3SX.
Tel: 01453 825255.
Fax: 01453 826266.
email: info@gbo.com