

eSwab vedela transpordisöötmega katsuti (eSwab® LIQUID AMIES)

Vedela transpordisöötmega katsuti mikrobioloogiliste proovimaterjalide kogumiseks ja transpordiks:
aerobne, anaerobne, seente külv



Kasuta proovimaterjali kogumiseks **eSwab vedela transpordisöötmega katsutit** (eSwab® liquid amies).

Saadaval on kaks erineva suurusega tamponi:

roosa korgiga – tavalise suurusega tampon




oranži korgiga – väikese suurusega tampon



Markeeri proovinõu patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ võõtkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood).




Teosta käte antiseptika. Kasuta kaitsekindaid kogu proovivõtmise ajal.

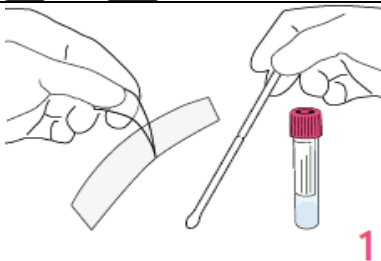


1. Ava proovimaterjali kogumispakend eSwab®, võta välja katsuti ja tampon


NB! Kontaminatsiooni vältimiseks jälgi, et ei puudutaks murdepunktist allapoole jäävat tamponiga osa.

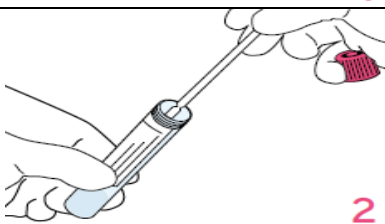


2. Kogu patsiendilt uuritav proovimaterjal. Keera eSwab® katsutilt kork, pane tamponiga kogutud materjaliga katsutisse.

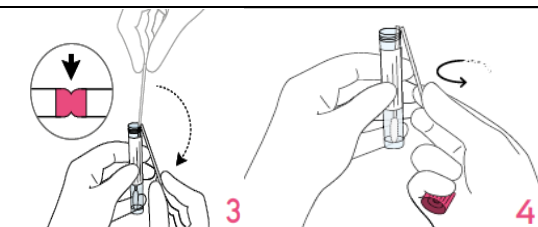

- 3.— 4. Murra tampon märgistatud murdekohast katsutisse

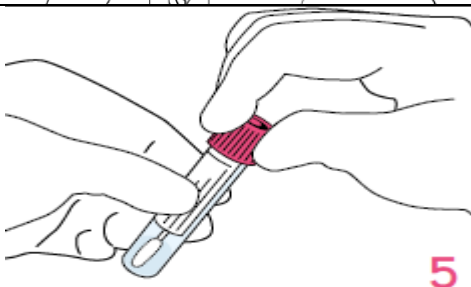

5. Sulge proovinõu lekkekindlat korgiga. Jälgi, et murtud ots sobituks korgi keskpaias olevasse spetsiaalsesse õõnsusesse ja kinnitub sinna

	<p>Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ vöotkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte:</p> <p>Materjal: registreeri õige materjal</p> <p>Proovinõu tüüp: eSwab vedela transpordisöötmega katsuti</p> <p>Sisendparameetrid: vajadusel</p> <p>Uuringumaterjali säilib +4 °C juures. Saata laborisse esimesel võimalusel.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eSwab vedela transpordisöötmega katsuti (eSwab® LIQUID AMIES); v02; 21.01.2021, koostamise eest vastutaja Pille Mee