





Materjali kogumine Bactec külvideks

Proovinõu: Kasuta proovimaterjali kogumiseks Bactec pudelit

| BactecAN pudel 8–10 ml | BactecAER pudel 8–10 ml | BactecMYC pudel 8–10 ml | BactecPEDS pudel 1–3 ml. Kasutada lastele või vähese materjali hulga korral | Uuringumaterjalid |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Abstessimaterjal Amnionivedelik Dialüüsivedelik Dreenieritis Haavaeritis Koevedelik Kõhuõõnevedelik Liigesevedelik Liikvor Perikardivedelik Pleuravedelik Sapp Veri |

Markeeri proovinõu patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ võotkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Ära kleebi kinni Bactec pudelil olevat võotkoodi.




Teosta käte antiseptika. Kasuta kaitsekindaid kogu proovivõtmise ajal.

Uuringumaterjali võtmine ja säilitamistingimused

Töötle punktsioonikoht naha antiseptikumiga. Korgikatte eemaldamise järel tuleb iga pudeli kork eraldi desinfitseerida vähemalt 70% alkoholilahusega. Verekülvide võtmiseks kasuta turvalibliknõela. Bactec pudelis on vaakum, seetõttu tuleb vere võtmisel hoolikalt jälgida pudelisse kogutud vere kogust, kasutades selleks pudelil oleval kleebisel paiknevat 5 mL intervalliga märgistust. Pärast nõelahoidjast eemaldamist tuleb pudelit loksutada ringjate liigutustega, et veri seguneks söötmeaga. Erandjuhul süstlaga punkteerimisel kasutada spetsiaalset turvanõela ja verepudelisse sisestamiseks spetsiaalselt süstla jaoks mõeldud turvasüsteemi.

Materjal saata laborisse esimesel võimalusel. Hoia toatemperatuuril (15...25 °C), väljaarvatud liikvor meningiiditekitaja diagnostikaks, mida hoida 37 °C juures.

| | |
|--|---|
|  | <p>Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/võõtkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte:</p> <p>Materjal: vt uuringumaterjalid</p> <p>Proovinõu tüüp: Bactec pudel</p> <p>Sisendparameetrid: täida vajadusel</p> |
|--|---|

Materjali kogumine Bactec külvideks v03; 14.07.2023, koostamise eest vastutaja Pille Mee