

Ninaneelukaape võtmise juhend nakkustekitajate (Ab, Ag, NAT) uuringuks

Markeeri proovinõu patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ võõtkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood).



Teosta käte antiseptika. Kasuta kaitsekindaid kogu proovivõtmise ajal.

Proovinõu: Steriilne tampooniga katsuti

Uuringumaterjal



Kolm erinevat tampooni:

valge korgiga – ultra väike tampoon lastele

oranži korgiga – keskmise suurusega tampoon (eelistatult)

roheline korgiga – ultra õhuke tampoon

Ninaneelukaabe

Proovinõu: UTM-katsuti tampooniga



Ninaneelukaabe

Uuringumaterjali võtmine ja säilitamistingimused

- Selgita patsiendile materjalivõtu protseduuri.
- Juhul kui patsiendil on nohu, peab patsient enne materjalivõttu nuuskama nina sekreedist tühjaks. Rohke sekreet võib takistada korrektse kaape kogumist.

Säilitustingimused:

UTM-katsuti tampooniga

Toatemperatuuril kuni üks ööpäev

2...8 °C juures kuni seitse ööpäeva

SARS koroonaviirus 2 RNA uuringu materjal 2...8

°C juures kuni üks ööpäev.

- Ninaneelukaape kogumisel patsient kallutab pea kuklasse. Täiskasvanutel võta materjal tampooniga alumise ninakarbiku piirkonnast, 5—7 cm sügavuselt ninaneelust. Lastel nina-kõrva telje keskpunktist. - Lükka tampoon õrnalt ninna. Keera ninaneelu sisestatud tampooni tugeva pöörava liigutusega vastu limaskesta 5 korda ja hoia paigal 5 sekundit, et koguda võimalikult palju nakatunud rakke. Eemalda tampoon ninast. Hoidu tampooniga midagi puudutamast (hoia tampooni käes) ja vii tampoon katsutisse. UTM-katsuti korral keera katsutilt kork pealt ja asetampoon katsutisse. Murra tampoon murdejoonelt vastu katsuti külge pooleks, vajadusel keera tampooni nii et see korralikult murduks. Viska ära ülemine murtud osa. Sule katsuti korralikult korgiga. Steriilse tampooniga katsuti korral, lükka tampoon tagasi katsutisse. Veendu, et katsuti kork on lõpuni kinni lükatud. - Aseta tampooniga katsuti minigrip kilekotti. NB! Väldi minigrip koti välispinna saastumist (ära katsu samade kinnastage millega proovimaterjali võtsid, vaheta kindad). Saastumiskahtluse korral desinfitseeri kilekoti välispind. Transportimiseks pakenda kogutud proovimaterjalid minigrip kilekottides eraldi suuremasse minigrip kilekotti. Juhul, kui proovimaterjal saadetakse laborisse koos paberikandjal tellimislehega, pakenda tellimislehed eraldi minigrip kilekotti.		Steriilne tampooniga katsuti 2...8 °C juures kuni kolm ööpäeva SARS koroonaviirus 2 RNA uuringu materjal 2...8 °C juures kuni üks ööpäev
	Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ võõtkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte: Materjal: Ninaneelukaabe Proovinõu tüüp: UTM-katsuti tampooniga või Steriilne tampooniga katsuti Sisendparameetrid: täitke vajadusel	