











Greiner BIO-ONE vaakumkatsutite verevõtu järjekord

Koostatud 18.07.2023

Korgi värvus	Proovinõutüüp	Lisand	Kasutusala	Segamine	
Hall Roheline Lilla Roosa Valge	 Bactec AER Bactec MYC Bactec AN Bactec PED Bactec MYCO/F Lytic		Mikrobioloogilised uuringud	<b>3-4 korda</b>	
Helesinine kork		helesinine 9NC	Naatrium-tsitraadiga	Hüübimisuuringud	<b>4-5 korda</b>
Punane kork		kollane (rõngas punasel) geeliga CAT	Hüübimis-aktivaatoriga, geeliga	Kliinilise keemia, immunoloogia, seroloogia uuringud	<b>5-10 korda</b>
Roheline kork		heleroheline (kollase rõngaga) geeliga LH	Hepariiniga, geeliga	Kliinilise keemia uuringud (k.a. ravimid)	<b>5-10 korda</b>
Lilla kork		lilla K2E/K3E	EDTA-lisandiga	Hematoloogilised ja immuun-hematoloogilised (AB0 ja RH(D)) uuringud	<b>5-10 korda</b>
Hall kork		NaF hall FX	Glükoosi inhibiitoriga	Glükoosi ja laktaasi määramine	<b>5-10 korda</b>
Kollane kork		BACD helekollane ACD	ACD-lisandiga	Koesobivuse analüüsid	<b>5-10 korda</b>
Tumesinine kork		sügavsinine mikroelemendid	Hüübimis-aktivaatoriga	Mikroelementide määramine	<b>5-10 korda</b>