

Esmasjoauriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Esmasjoauriini kogumiseks kasutatavad proovinõud (Vacuette)



Proovitops



Uriinikatsuti



Uriinikatsuti konservandiga

Ettevalmistus: valmista ette proovitops ja uriinikatsuti või vajadusel paber kandjal tellimisleht.

Proovinõud: uriinikatsutit kasuta uriini uuringute korral ja mikrobioloogilised uuringud. Uriinikatsuti konservandiga kasuta uriini mikrobioloogiliseks uuringuks.

eHL või muu infosüsteemi kasutajad: markeeri uriinikatsuti vötkoodiga ja esita tellimus elektroonselt. Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

Paberkandjal tellimisleht: markeeri uriinikatsuti patsiendi ees- ja perekonnanimega ning isikukoodiga. Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

1. Pese välissuguelundid voolava veega (pesemisvahendeid ei ole lubatud kasutada). Kuivata välissuguelundid kergelt.

2. Keera lahti proovitopsi kaas. Aseta kaas nii, et kaane põhjal olev imemisotsik jääks suunaga ülespidi.



3. Tähelepanu! Imemisotsikut käega mitte puutuda.



4. Kogu proovitopsi 15 – 30 esmasjoa uriini ehk täida ¼ proovitopsist. Lõpeta urineerimine WC potti.

5. Keera proovitopsile kaas peale. Sega ja seejärel eemalda kaanelt kaitsekleebis.



6. Suru uriinikatsuti kaanes oleva avause põhja. Hoia katsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti avausest.



7. Keerake katsutit rahulikult vähemalt 5 korda tagurpidi ja asetage kaitsekleebis tagasi kaanel olevale avausele. Ülejäänud uriin vala kanalisatsiooni ja tühi tops viska olmeprügisse.



8. Kontrolli, kas uriinikatsuti on korrektelt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/vötkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte:
Proovinõu tüüp:
uriinikatsuti või uriinikatsuti konservandiga
Sisendparameetrid:
vajadusel



9. Uriinikatsuti või/uriinikatsuti konservandiga saata laborisse nii kiiresti kui võimalik. **NB!** Uriinikatsutit mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni, kui see ei ole võimalik, hoia katsutit temperatuuril +2...+8 °C ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt 48 tunni jooksul.
Uriinikatsuti konservandiga uriini säilivusaeg toatemperatuuril kuni 48 tundi.