

Kateetrist uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Valmista ette uriinikatsuti, adapter või nõel ja nõelahoidja ning vajadusel paberkandjal tellimisleht.

eHL või muu infosüsteemi kasutajad: markeeri uriinikatsuti võõtkoodiga ning esita tellimus elektroonselt.

Paberkandjal tellimisleht:

markeeri uriinikatsuti
patsiendi ees- ja perekonnanime
ning isikukoodiga.




Nõel ja
nõelahoidja



Adapter




Uriinikatsuti
konservandiga

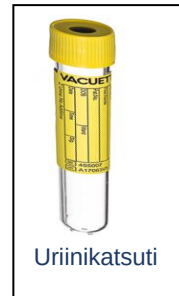


Uriinikatsuti


Uriini võtmine kateetrist

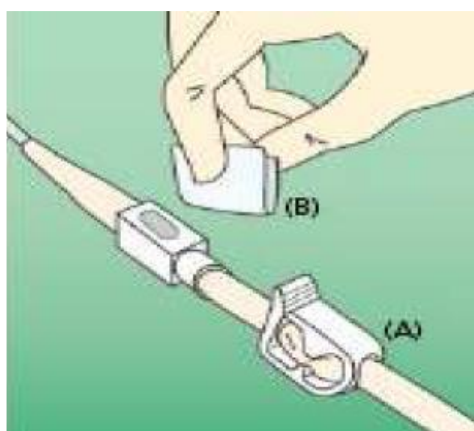

Sulge kateetri voolik (A). Puhasta kateetri proovivõtu koht (B).

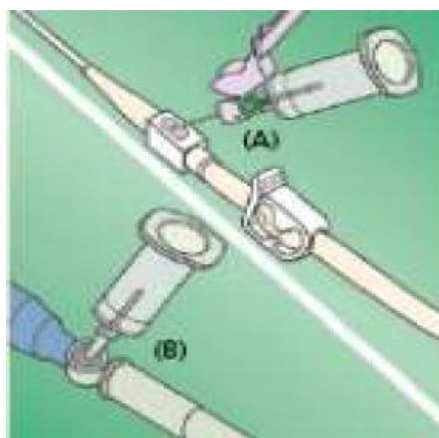

Kontrolli, et voolik sisaldaks uriini. Torka proovivõtukoht nõelaga läbi (A) või kasuta adapterit (B).

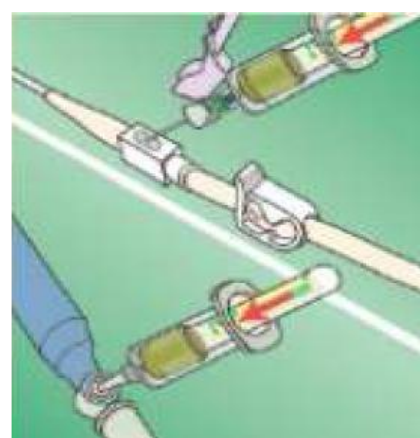

Suru uriinikatsuti või uriinikatsuti konservandiga nõelahoidja või adapteri põhja. Hoia uriinikatsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda uriinikatsuti.

Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/võõtkood või ees- ja perekonnanime, isikukood).

Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte.

Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

Materjal: registreeri õige materjal

Proovinõu tüüp: **uriinikatsuti või uriinikatsuti konservandiga**

Sisendparameetrid: **vajadusel**

Uriinikatsuti saatmine laborisse

Uriinikatsuti saata laborisse nii kiiresti kui võimalik (mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni). Kui see ei ole võimalik, hoia uriinikatsutit temperatuuril +2...+8 °C ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt nelja tunni jooksul.



Kasutatud kirjandus: <https://shop.gbo.com/en/row/products/preanalytics/urine-collection/>