


Imikutel ja väikelastel uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Valmista ette uriinikatsuti, adapteriga ühekordne kõrs, uriini kogumiskott ning vajadusel paberkandjal tellimisleht.


eHL või muu infosüsteemi kasutajad:

markeeri uriinikatsuti vöötkoodiga ning esita tellimus elektroonselt.

Paberkandjal tellimisleht: markeeri uriinikatsuti patsiendi ees- ja perekonnanime ning isikukoodiga.

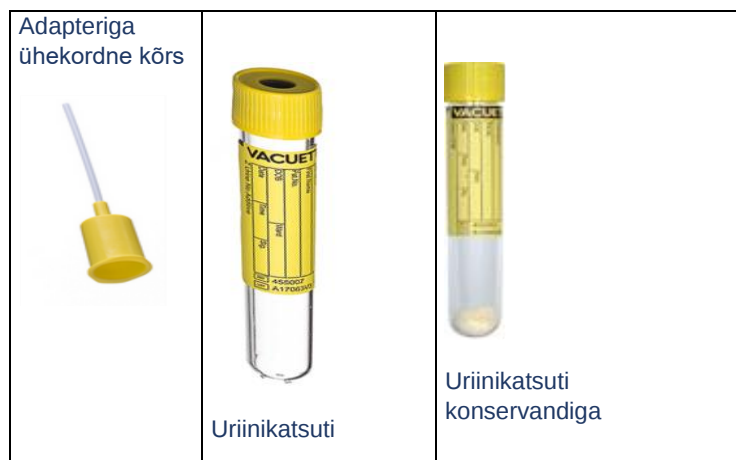

Pese lapse genitaalide piirkond hoolikalt veega. Kleebi nahale steriilne kogumiskott ja jälgi aeg-ajalt uriinivoolu. Kogumiskott võib nahal olla maksimaalselt **üks tund**. Kui selle aja jooksul uriiniproovi ei õnnestu koguda, tuleb pesemist ja kogumisprotseduuri uue steriilse kotiga korrata.

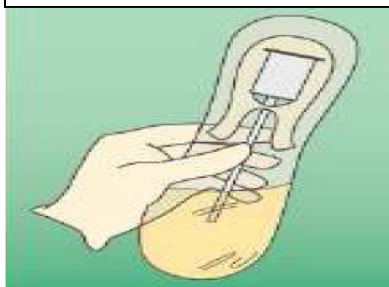

1. Hoia uriini kogumisekotti vertikaalselt, aseta adapteriga ühekordne kõrs uriini sisse. Kui on vaja täita mitu uriinikatsutit, siis esmalt täita kollase korgiga (musta rõngaga) konservandiga uriinikatsuti (aeroobne külv), seejärel kollase korgiga katsuti (nt ribaanalüüs, sademe mikroskoopia, albumiini ja kreatiniini suhe).



2. Hoia ühe käega kõrt (A), teise käega suru uriinikatsuti või uriinikatsuti konservandiga adapteri põhja, läbistades nõelaga uriinikatsuti korgi (B). Hoia uriinikatsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti adapterist.

Uriinikatsuti saatmine laborisse

Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg. Uriinikatsuti saata laborisse nii kiiresti kui võimalik (mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni). Kui see ei ole võimalik, hoia uriinikatsutit temperatuuril +2...+8 °C ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt nelja tunni jooksul. Uriinikatsuti konservandiga uriini säilivusaeg toatemperatuuril kuni 48 tundi.



Kasutatud kirjandus: <https://shop.gbo.com/en/row/products/preanalytics/urine-collection/>; 980246_Rev11_07-2018; 980205_Rev12_03-2022