

Keskjoauriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Keskjoauriini kogumiseks kasutatavad proovinõud (Vacuette)



Proovitops



Uriinikatsuti



Uriinikatsuti konservandiga

Ettevalmistus: valmista ette proovitops ja uriinikatsuti või vajadusel paberkandjal tellimisleht.

Proovinõud: uriinikatsutit kasuta uriini uuringute korral ja mikrobioloogilised uuringud. Uriinikatsuti konservandiga kasuta uriini mikrobioloogiliseks uuringuks.

eHL või muu infosüsteemi kasutajad: markeeri uriinikatsuti vötkoodiga ja esita tellimus elektroonselt. Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

Paberkandjal tellimisleht: markeeri uriinikatsuti patsiendi ees- ja perekonnanimega ning isikukoodiga. Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

1. Pesu välissuguelundid voolava veega (pesemisvahendeid ei ole lubatud kasutada). Kuivata välissuguelundid kergelt.

2. Keera lahti proovitopsi kaas. Aseta kaas nii, et kaane põhjal olev imemisotsik jääks suunaga ülespidi.



3. Tähelepanu! Imemisotsikut käega mitte puutuda.



4. Urineeri esimene 10 milliliitrit WC-potti, juga katkestamata kogu proovitopsi umbes 50 ml uriini.

5. Keera proovitopsile kaas peale. Sega ja seejärel eemalda kaanelt kaitsekleebis.



6. Suru uriinikatsuti kaanes oleva avause põhja. Hoia katsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti avausest. Kui on vaja täita mitu uriinikatsutit, siis esmalt täita kollase korgiga (musta rõngaga) konservandiga uriinikatsuti (aeroobne külv), seejärel kollase korgiga katsuti (nt ribaanalüüs, sademe mikroskoopia, albumiini ja kreatiniini suhe).



7. Keerake katsutit rahulikult vähemalt 5 korda tagurpidi ja asetage kaitsekleebis tagasi kaanel olevale avausele. Ülejäänud uriin vala kanalisatsiooni ja tühi tops viska olmeprügisse.



8. Kontrolli, kas uriinikatsuti on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/vötkood või ees- ja perekonnanime, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgige järgmisi aspekte:
Proovinõu tüüp: uriinikatsuti või uriinikatsuti konservandiga
Sisendparameetrid: vajadusel



9. Uriinikatsuti või uriinikatsuti konservandiga saata laborisse nii kiiresti kui võimalik. **NB!** Uriinikatsutit mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni, kui see ei ole võimalik, hoia katsutit temperatuuril +2...+8 °C ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt nelja tunni jooksul.
Uriinikatsuti konservandiga uriini säilivusaeg toatemperatuuril kuni 48 tundi.