

Kateetrist uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Valmista ette uriinikatsuti, adapter või nõel ja nõelahoidja ning vajadusel paber kandjal tellimisleht.

eHL või muu infosüsteemi kasutajad: markeeri uriinikatsuti võõtkoodiga ning esita tellimus elektroonselt.

Paber kandjal tellimisleht:

markeeri uriinikatsuti
patsiendi ees- ja perekonnanime
ning isikukoodiga.



Nõel ja
nõelahoidja



Adapter



Uriinikatsuti




Uriinikatsuti
konservandiga


Uriini võtmine kateetrist



Sulge kateetri voolik (A). Puhasta kateetri proovivõtu koht (B).

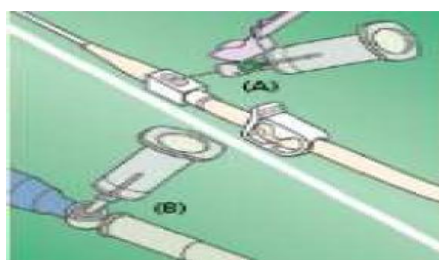

Kontrolli, et voolik sisaldaks uriini. Torka proovivõtukoht nõelaga läbi (A) või kasuta adapterit (B). Kui on vaja täita mitu uriinikatsutit, siis esmalt täita kollase korgiga (musta rõngaga) konservandiga uriinikatsuti (aeroobne külv), seejärel kollase korgiga katsuti (nt ribaanalüüs, sademe mikroskoopia, albumiini ja kreatiniini suhe).

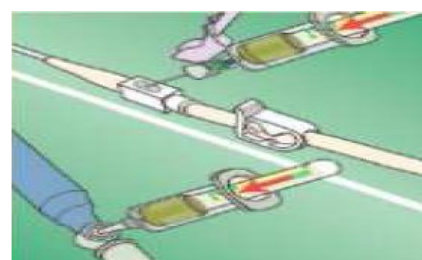

Suru uriinikatsuti või uriinikatsuti konservandiga nõelahoidja või adapteri põhja. Hoia uriinikatsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda uriinikatsuti.

Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/võõtkood. või ees- ja perekonnanime, isikukood).

Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte.

Kirjuta uriinikatsutile uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

Materjal: registreeri õige materjal

Proovinõu tüüp: **uriinikatsuti või uriinikatsuti konservandiga**

Sisendparameetrid: **vajadusel**

Uriinikatsuti saatmine laborisse

Uriinikatsuti saata laborisse nii kiiresti kui võimalik (mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni). Kui see ei ole võimalik, hoia uriinikatsutit temperatuuril +2...+8 °C ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt nelja tunni jooksul. Uriinikatsuti konservandiga uriini säilivusaeg toatemperatuuril kuni 48 tundi.



Kasutatud kirjandus: <https://shop.gbo.com/en/row/products/preanalytics/urine-collection/>;
980246_Rev11_07-2018; 980205_Rev12_03-2022