

eSwab vedela transpordisöötmega katsuti (eSwab® LIQUID AMIES)



Kasuta proovimaterjali kogumiseks **eSwab vedela transpordisöötmega katsuti** (eSwab® liquid amies).

Saadaval on kaks erineva suurusega tampooni:

roosa korgiga – tavalise suurusega tampoon




oranži korgiga – väikese suurusega tampoon



Markeeri proovinõu patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ võõtkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood).




Teosta käte antiseptika. Kasuta kaitsekindaid kogu proovivõtmise ajal.

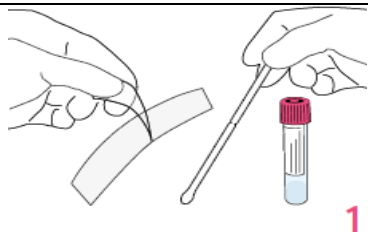


1. Ava proovimaterjali kogumisepakend eSwab®, võta välja katsuti ja tampoon.


NB! Kontaminatsiooni vältimiseks jälgi, et ei puudutaks murdepunkti allapoole jäävat tampooniga osa.

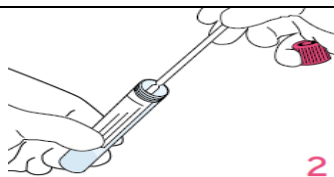

2. Kogu patsiendilt uuritav proovimaterjal. Keera eSwab® katsutilt kork, pane tampooniga kogutud materjaliga katsutisse.

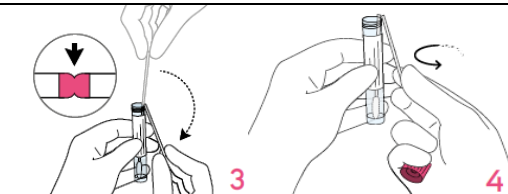

3.– 4. Murra tampoon märgistatud murdekohast.

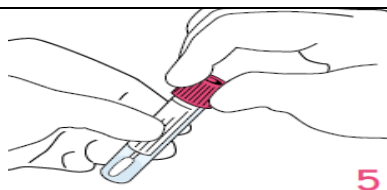

5. Sulge proovinõu lekkekindlat korgiga. Jälgi, et murtud ots sobituks korgi keskpäigas olevasse spetsiaalsesse õõnsusesse ja kinnitub sinna.



Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ võõtkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte.

Materjal: registreeri õige materjal

Proovinõu tüüp: **eSwab vedela transpordisöötmega katsuti**

Sisendparameetrid: vajadusel

Proovimaterjali säilivus +2 kuni +8 °C kaks ööpäeva