









SA TÜK ühendlaboris kasutatavad proovinõud. Abimaterjal eHL-st elektroonse tellimuse teostamiseks.

			Segamine
Bactec AER Bactec MYC Bactec AN Bactec PED Bactec MYCO/F Lytic			3 – 4 korda
Proovinõutüüp	Greiner BioOne (Vacuette) korki värvus	Lisand	
helesinine 9NC		Naatrium-tsitraadiga	4 – 5 korda
kollane (rõngas punasel) geeliga CAT		Hüübimis-aktivaatoriga, geeliga	5 – 10 korda
heleroheline (kollase rõngaga) geeliga LH		Hepariiniga, geeliga	5 – 10 korda
lilla K2E/K3E		EDTA-lisandiga	5 – 10 korda
NaF hall FX		Glükoosi inhibiitoriga	5 – 10 korda
BACD helekollane ACD		ACD-lisandiga	5 – 10 korda
sügavsinine mikroelemendid		Hüübimis-aktivaatoriga	5 – 10 korda
valge lisandita		lisandita	5 – 10 korda
Happe-aluse tasakaal arteriaalses/ venoosses veres			
LH-süstal	 3 ml 1 ml		10 korda

Proovinõud	
uriinikatsuti	
uriinikatsuti konservandiga	
steriilne proovitops	
steriilne proovitops aspiratsioonisüsteemi kasutamise korral võib laborisse saata asp.süsteemis oleva steriilse proovitopsi	
roojatops	
koonuspõhjaga katsuti	
Steriilne tampooniga katsuti Kolm erinevat tampooni: valge korgiga – ultra väike tampoon lastele oranži korgiga – keskmise suurusega tampoon (eelistatult) roheline korgiga – ultra õhuke tampoon	
eSwab vedela transpordisöötmeega katsuti Kaks erinevat tampooni: roosa korgiga – tavalise suurusega tampoon oranži korgiga – väikese suurusega tampoon	

	
UTM-katsuti tampooniga	
steriilne glütseroolitampooniga katsuti	
ThinPrep proovitops	
Alinity m multi-collect PCR proovivõtukomplekt	
steriilne kaksiktampooniga katsuti	
madal transpordisöötmega katsuti	
läätsetops	erinevad tüübid
oranž TransFix/EDTA	

<p>proovitops III ohuaste (kork eelmärgistatud kirjega TB)</p>					
<p>proovitops dermatofüütidele</p>					
<p>alusklaas (komplekt koosneb transportkarbist ja kahest eelkoodistatud alusklaasist pakituna minigripp kilekotti, kasutatakse Leishman-Giemsa ja Grami mikroskoopias)</p>					
<p>süljekatsuti</p>					
<p>bactec AER pudel</p>	<p>bactec AN pudel</p>	<p>bactec MYC pudel</p>	<p>bactec PED pudel</p>	<p>Myco/F-Lytic pudel</p>	
					

Quantiferoni komplekt	 Three Quantiferon test tubes are shown. The top tube is purple and labeled 'Quantiferon® Nil'. The middle tube is green and labeled 'Quantiferon® TB1'. The bottom tube is yellow and labeled 'Quantiferon® TB2'. Each tube has a white label with fields for 'First Name' and 'Plat. No.' and a CE mark.
NIPT katsutite komplekt	 A glass vial with a white label is shown. The label includes 'LOT 72470315', '2019-09-04', 'STERILE', and 'A153N'. The vial is partially filled with a clear liquid.
eppendorfi katsuti	 A clear microcentrifuge tube (Eppendorf tube) is shown, containing a small amount of clear liquid. The tube has a white cap and a scale on the side.