

VACUETTE® SAFETY Blood Collection Set + Holder - OHULIBLIKNOEL KOOS NÕELAHOIDJAGA KASUTUSJUHE

VACUETTE® SAFETY Blood Collection Set + Holder - ohulibliknõel koos nõelahoidjaga on sobilik rutiinseks verevõtuks VACUETTE katsutitega. 21G või 23 G nõela pikkus on 19-20 mm, vooliku pikkus 170-200 mm. ohuliblikmõel sobib kasutamiseks vastsündinutel, lastel, täiskasvanutel ja eakatel. Seade koosneb ohulibliknõelast, mis on ühendatud painduva voolikuga ja nõelahoidjaga. Nõelatorkevigastuste ohu minimeerimiseks mõeldud ohutusfunktsiooni saab aktiveerida ühe käega kohe pärast kasutamist, kui nõel on veel veenis. Ohulibliknõela hoida temperatuuril 4–25 °C. Vältida otsest päikesevalgust. Kahjustatud või pakendi või toote korral ärge toodet kasutage. Ärge kasutage toodet pärast kõlblikkusaja lõppu.




Nõela suuruse valimine. Õige nõela suuruse valimine on oluline patsiendi mugavuse, tüsistuste minimeerimise ja proovi terviklikkuse säilitamise seisukohalt. Enne nõela valimist hinnake veeni suurust ja seisundit. Optimaalse voolu ja hea proovi saamiseks kasutage suurimat suurust, mis sobib patsiendi veeniga.

Soovitused suuruse kohta: 21 G sobib täiskasvanutele ja 23 G sobib keerukate veenide korral täiskasvanutele ja õrnadele või väikestele veenidele, mis on tavalised vastsündinutel, lastel ja eakatel.

Ohulibliknõela kasutamine.

- Rakendage standardseid ettevaatusabinõusid. Olulisemad neist on kätehügieen, isikukaitsevahendite kasutamine ning puhas töökeskkond.
- Nõelatorkevigastuste vältimiseks hoidke käed alati nõela taga.
- Ava blisterpakend ja võta pakendist ohulibliknõel. Koguge veri veenivere võtmise juhendi JÜL_GELA-6.1.2 kohaselt.
- Asetage patsiendi käsivars suunaga allapoole, eemaldage nõelakaitse ja teostage veenipunktsioon, hoides ohulibliknõela tiibadest ① või korpusest vahetult tiibade ② taga. Tagasivool, mis on olemas patsiendi veenirõhust, kinnitab õnnestunud veenipunktsiooni. Mõnel juhul ei ilmu tagasivoolu isegi siis, kui veenipunktsioon oli edukas.
- Vajaduse korral fikseerige libliknõel vere võtmise ajaks. Ärge katke ohutusmehhanismi kleeplindiga. Eemaldage žgutt kohe, kui katsutisse ilmub veri. Hoidke alati katsutit paigal, vajutades pöidla või sõrmega katsutile, et tagada täielik vaakum ③. MÄRKUS. Alatäitmise suhtes tundlike testide tegemisel tuleb eelnevalt võtta ära visatav katsuti (lisaaineteta)
- Pärast proovivõtmist asetage punkteerimiskohale ilma survet avaldamata marlitampoon.
- Ohulibliknõel on ette nähtud veenisiseseks aktiveerimiseks. Aktiveerige ohutusmehhanism ühe käega, vajutades siniseid vabastusnuppe, kui nõel on veel veenis ⑤. Ärge takistage automaatset tagasitõmmet.
- Nõel tõmbub korpusesse tagasi, kuni kuulete klõpsatust. Klõps kinnitab, et ohutusmehhanism on õigesti aktiveeritud.
- Avaldage punkteerimiskohale marlilapiga nõrka survet ⑥.
- Visake vereproovi võtmise komplekt pärast kasutamist vastavasse jäätmemahutisse.

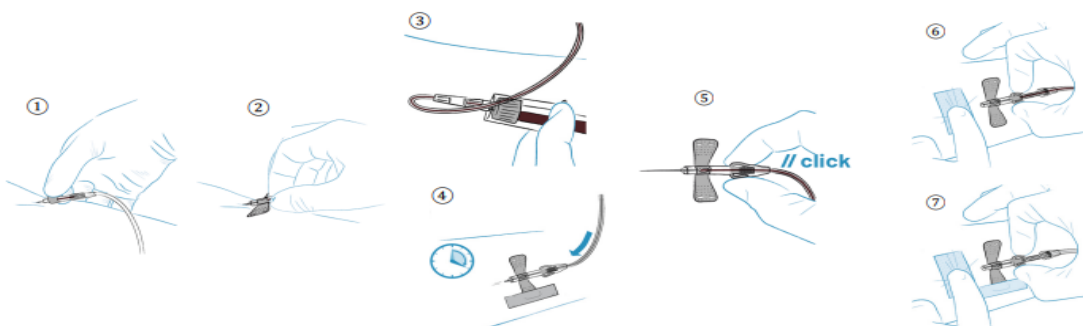

Kasutatud kirjandus 980224_Rev12_01-2022 ja pildid: 980274_Rev02_06-2025, Greiner Bio-One GmbH.

Koostas Pille Mee, SA TÜK, ühendlabor, 16.07.2026 v02